

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Alkomat tester trzeźwości FiTalco Neon F1  
(105-050)

**SENTECH** 

DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska  
Ul. Wiejska 46  
tel: +48 32 265 22 00  
[sklep@kolba.pl](mailto:sklep@kolba.pl)

**INFORMACJE OGÓLNE**  
**TESTER TRZEŹWOŚCI FiTALCO Neon F1**

**Specyfikacja techniczna**

**Wyświetlacz:** dwukolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem

**Wymiary:** 126x69x29 mm

**Waga:** 155 g wraz z baterią

**Typ czujnika:** elektrochemiczny

**Metoda pomiaru:** Próbkę powietrza w ‰

**Zakres pomiaru:** od 0.00‰ do 3.00‰

(czyli od 0.00 do 1.44mg/l lub od 0.000 do 0.300 BAC)

**Dokładność:** +/- 0.05‰ przy wartości 0.5‰

**Czas przygotowania do pracy:** ok. 15 sekund

**Czas trwania pomiaru:** ok. 6 sekund

**Czas podania wyniku:** ok. 10 sekund

**Automatyczny wyłącznik:** 20 sekund od ostatniego pomiaru

**Zasilanie:** bateria alkaliczna 6LR61 9V

Żywotność baterii: do 500 pomiarów (w zależności od stosowanej baterii)

Dodatkowa opcja zasilania: zasilacz samochodowy 12V (w zestawie)

**Dopuszczalna temperatura pracy:** od 0°C do 40°C

**Dopuszczalna temperatura przechowywania:**

od -10°C do 50°C

**Kalibracja:** co 6 miesięcy

**OSTRZEŻENIE:** Ponieważ poziomy zawartości alkoholu i stopień zatrucia różnią się pomiędzy różnymi osobami, producent i sprzedawca tego produktu nie biorą odpowiedzialności za żadne wypadki, zniszczenia ani szkody wynikające z jego zastosowania.

## **INFORMACJE OGÓLNE**

### **TESTER TRZEŹWOŚCI FiTALCO Neon F1**

Dziękujemy za zakup testera trzeźwości FiTALCO Neon F1 opartego na technologii elektrochemicznej. Precyzja cyfrowego pomiaru pozwala dokładnie określić poziom stężenia alkoholu we krwi.

Działanie czujnika oparte jest na elektrochemicznej reakcji zachodzącej pomiędzy platyną a molekułami etanolu.

### **Gwarancja**

Gwarancja traci ważność jeśli tester był uprzednio rozkręcany, lub usunięto z niego naklejki zabezpieczające, albo jeśli był naprawiany przez organy do tego nieupoważnione. Ponadto gwarancja traci ważność jeśli tester był używany do celów niezgodnych z przeznaczeniem tego urządzenia. Więcej informacji o warunkach gwarancji znajduje się na końcu tej instrukcji.

### **Serwis**

Okresowy serwis i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Więcej informacji na temat serwisu oraz kalibracji znajduje się na końcu tej instrukcji

### **Zanim wykonasz test**

Wypłucz usta wodą lub płynem nie zawierającym alkoholu. Powstrzymaj się od palenia tytoniu (na minimum 20 minut przed wykonaniem testu) oraz picia alkoholu (na minimum 20 minut przed wykonaniem testu). Pozostałości alkoholu w ustach mogą znacznie zwiększyć wynik pomiaru. Taki sam skutek może mieć również wypicie aromatyzowanych lub owocowych soków, a także spożywanie słodczy, lub syropów na bazie alkoholu, oraz płukanie ust płynami zawierającymi alkohol.

W celu zachowania zasad higieny, należy korzystać z jednorazowych ustników.

**Amii**

www.fitalco.pl | email:lodz@amii.pl | tel.42 6484848

**INFORMACJE OGÓLNE**  
**TESTER TRZEŹWOŚCI FiTALCO Neon F1**

**Zestaw zawiera:**

1. Sprawdzony i skalibrowany tester
2. Ustniki 5 szt.
3. Baterię 6LR61 9V
4. Zasilacz do gniazda samochodowego 12V
5. Etui na tester
6. Instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną



**UWAGA:** Na minimum 20 minut przed wykonaniem testu nie należy jeść, pić i palić tytoniu. Niezastosowanie się do powyższych instrukcji doprowadzi do zafałszowania testu i uszkodzenia urządzenia.



**UWAGA:** Wiele czynników środowiskowych, takich jak dym papierosowy, przeróżne zapachy, pozostałości gazów mogą znacznie wpłynąć na poziom koncentracji alkoholu we krwi (BAC), a zatem zafałszować wyniki przeprowadzonego testu. W takich przypadkach zarówno producent jak i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za stosowanie testera w niewłaściwych warunkach.



**UWAGA:** Należy jednostajnie dmuchać w ustnik podłączony do testera aż do zaniku sygnału dźwiękowego i usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Wcześniejsze zaprzestanie dmuchania podczas dokonywania pomiaru znacząco wpłynie otrzymany wynik.




## INFORMACJE OGÓLNE

### TESTER TRZEŹWOŚCI FiTALCO Neon F1

### Schemat testera



### Komunikaty wyświetlacza LCD

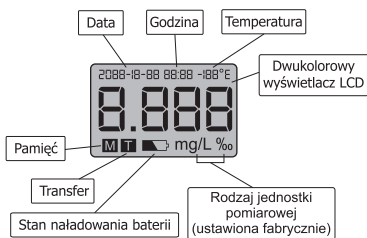

\* **UWAGA!** Przy przekroczeniu wartości 0,5 promila, wyświetlacz zmieni kolor na czerwony oraz usłyszysz dźwięk alarmu

**Amii**

www.fitalco.pl | email:lodz@amii.pl | tel.42 6484848

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**TESTER TRZEŹWOŚCI FiTALCO Neon F1**

## 1. Przygotowanie testera do pracy

Otwórz przykrywkę od baterii, odkręcając uprzednio wkręt mocujący za pomocą śrubokręta krzyżowego i włóż baterię alkaliczną 6LR61 9V. Następnie zamknij przykrywkę, dokręć wkręt i osadź ustnik w miejscu na niego przeznaczonym na lewym boku testera.

## 2. Pomiar

Naciśnij przycisk **TEST** znajdujący się z przodu testera (pod wyświetlaczem LCD) i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy. Tester przygotowuje się do pracy odliczając czas w sekundach od 15 do 0. Migająca litera „C” na wyświetlaczu informuje o gotowości do dokonania pomiaru. W celu dokonania pomiaru wdmuchuj powietrze miarowo i powoli przez ok. 6 sekund. W trakcie pomiaru usłyszysz ciągły sygnał dźwiękowy - nie przerywaj dmuchania aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia - zamknięcia dopływu powietrza do komórki pomiarowej.



**Uważaj**, aby podczas wdmuchiwania powietrza ślina nie dostała się do urządzenia, gdyż może ona uszkodzić czujnik.



Podczas testu **nie blokuj wylotu powietrza** po przeciwnej stronie ustnika, gdyż może to uszkodzić czujnik.









Po dłuższym okresie nieużywania przez **pierwsze 2-3 pomiary** tester może podawać niedokładne wyniki.

Po poprawnie wykonanym pomiarze na wyświetlaczu wyświetli się wynik pomiaru w promilach (‰). Wynik będzie widoczny na wyświetlaczu przez 20 sekund, po tym czasie urządzenie wyłączy się.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**TESTER TRZEŹWOŚCI FiTALCO Neon F1**

### 3. Możliwe komunikaty i ich znaczenie

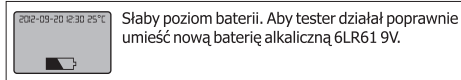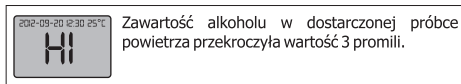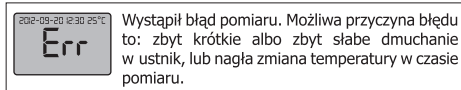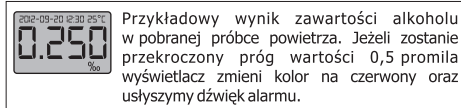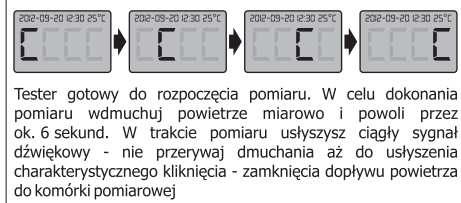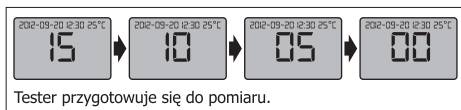

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**TESTER TRZEŹWOŚCI FiTalco Neon F1**

#### **4. Pamięć pomiarów**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez ok. 2 sekundy. Naciskaj przycisk **PRINT** aby odczytać poprzednie pomiary: wartość pomiaru oraz czas jego przeprowadzenia. Po 10 sekundach braku aktywności urządzenie wyłączy się. Tester FiTalco Neon F1 zapamiętuje automatycznie 10 ostatnich pomiarów.

#### **5. Ustawienie daty i godziny**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez ok. 2 sekundy. Naciśnij ponownie przycisk **SET** aby przejść do edycji daty i godziny (kolejno: rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta). Naciskaj przycisk **PRINT** w celu wprowadzenia właściwych danych. W celu zakończenia edycji naciśnij przycisk **SET**.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**TESTER TRZEŹWOŚCI FiTALCO Neon F1**



**OSTRZEŻENIA**

**Przeczytaj zanim uszkodzisz swój tester!**

1. Nie dokonywać pomiaru bezpośrednio po spożyciu alkoholu. Przed dokonaniem pomiaru odczekać co najmniej 20 minut po ostatnim spożyciu alkoholu.
2. Nie dokonywać pomiaru bezpośrednio po paleniu tytoniu. Przed dokonaniem pomiaru odczekać co najmniej 20 minut po paleniu tytoniu.
3. Bezpośrednio przed wykonaniem testu nie należy spożywać produktów zawierających alkohol (np. słodczyce) lub płukać ust preparatami na bazie alkoholu.
4. Przed wykonaniem testu należy upewnić się czy w powietrzu nie ma alkoholu lub oparów środków czyszczących lub dezynfekujących.
5. Chronić czujnik urządzenia przed wilgocią i cieczami.
6. Chronić urządzenie przed niskimi i wysokimi temperaturami - np. nie przechowywać urządzenia w samochodzie.
7. Trzymać urządzenie z daleka od anten telefonów komórkowych lub nadajników.
8. Urządzenie przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
9. W przypadku wystąpienia wskazań budzących podejrzenie przesłać tester do kalibracji.
10. Należy wyjąć baterie z urządzenia jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas.
11. Przez pierwsze 2-3 pomiary po dłuższym okresie nieużywania, tester może podawać niedokładne wyniki.
12. Przechowuj tester z dala od produktów / materiałów zawierających alkohol.
13. Do urządzenia można stosować TYLKO BATERIE ALKALICZNE.

**Amii**

[www.fitalco.pl](http://www.fitalco.pl) | [email:lodz@amii.pl](mailto:email:lodz@amii.pl) | tel.42 6484848

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**TESTER TRZEŹWOŚCI FiTALCO Neon F1**

**Wskazówki praktyczne**

1. Zawartość alkoholu we krwi jest bezpośrednio związana z zawartością alkoholu w oddechu. Wypity alkohol rozprzestrzenia się we krwi przez około 20 – 30 minut, dlatego też wskazane jest dokonywanie pomiarów po upływie tego czasu.
2. Przez około 20 minut od ostatniego kontaktu z alkoholem nie należy wykonywać pomiaru gdyż utrzymujące się przez ten czas wysokie stężenie alkoholu w ustach wpływa na znaczne zawyżenie wyniku.
3. Należy unikać dokonywania pomiaru na otwartej przestrzeni w czasie silnego wiatru oraz w zadymionych pomieszczeniach.

**UWAGA!**

Badania tym testerem nie mogą być podstawą do wszczęcia jakichkolwiek postępowań karnych. W celu uzyskania wyników będących podstawą dla wyroków sądowych, należy stosować inne testery z naszej oferty. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z jednym z naszych działów handlowych:

Warszawa ( tel. 22 886 40 10, email: warszawa@amii.pl)  
Łódź ( tel. 42 648 48 48, email: lodz@amii.pl)

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**TESTER TRZEŹWOŚCI FiTALCO Neon F1**

## **Gospodarowanie użytym sprzętem**

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

## **Wymiana baterii**

Aby wymienić baterię należy otworzyć klapkę znajdującą się z tyłu testera uprzednio wykręcając wkręt zabezpieczający za pomocą śrubokręta krzyżowego. Wyjmij wyczerpaną i włóż nową baterię 6LR61 9V. Do urządzenia można stosować TYLKO BATERIE ALKALICZNE.

Po wymianie baterii należy ją przekazać do punktu zbierania zużytych baterii. Punktami tymi są między innymi jednostki handlu detalicznego i hurtowego. Nie wolno baterii tych mieszać z odpadami komunalnymi – składowanie ich na wysypiskach śmieci może spowodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Niestosowanie się do tego przepisu zagrożone jest karą grzywny.

Powyższe przepisy są zgodne z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 6 września 2006.

**Amii**

www.fitalco.pl | email:lodz@amii.pl | tel.42 6484848