

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

KOCE TERMICZNE

Koc termiczny jest przeznaczony do utrzymywania odpowiedniej temperatury ciała w ekstremalnych warunkach.

Użytkowanie

Owiń kocem całe ciało, w tym głowę, pozostawiając jedynie twarz odkrytą, aby umożliwić oddychanie. Srebrna strona koca powinna być skierowana do wewnątrz, aby odbijać ciepło ciała i zapobiegać jego utracie. Rozłóż koc termiczny srebrną stroną skierowaną na zewnątrz, aby odbijał promienie słoneczne. Możesz zawiesić koc w formie osłony lub namiotu, aby stworzyć cień w słoneczne dni.

Ostrzeżenia

Koca nie należy prać w pralce. Przechowuj koc w suchym, chłodnym miejscu. Sprawdź stan techniczny koca po każdym użyciu. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami i powierzchniami. W przypadku wystąpienia objawów hipotermii, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Koc termiczny nie jest źródłem generującym ciepło.