

# INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

## Wkłady chłodzące

Wkład chłodzący to jednorazowy kompres o właściwościach chłodzących, który szybko łagodzi ból i zmniejsza opuchliznę przy wszelkiego typu urazach. Znajdź we wkładzie torebkę z płynem i ściśnij mocno, aby ją przerwać. Wstrząśnij, aby wymieszać zawartość. Przyłóż kompres. Wyrzuć po użyciu.

## Bezpieczeństwo użytkowania

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Dzieci powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie przebijaj. W przypadku uszkodzenia opakowania i wycieku zawartości, unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu natychmiast spłucz obficie wodą i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie połykaj zawartości. W przypadku połknięcia popij dużą ilością wody (nie mleka!) i skontaktuj się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.
- Osoby z zaburzeniami krążenia nie powinny korzystać z produktu, chyba że pod bezpośrednim nadzorem lekarza.
- Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Nie próbuj ponownie aktywować i używać produktu.
- Nie stosuj na uszkodzoną skórę, odmrożenia ani w przypadku nadwrażliwości na zimno.